



规格：8×10in, 10×12in, 11×14in, 12×15in, 14×14in,

14× 17in, 30×40cm

每盒数量：100 张

每箱数量：5 盒

富明威感绿医用 X 光胶片是一种正色医用 X-光胶片，配合感绿稀土屏使用可以获得高质量影响。胶片的特性上追求了对比与曝光时间的高度平衡。适用于普通放射诊断造影使用：包括颅骨、胸腔、腹腔、四肢及血管造影。无论你的处理设备是 45 秒超快速，90 秒快速，低量或手动冲洗都能得到稳定，高分辨率图像。技术的突破性提高使日常应用质量控制更加方便高效。

富明威感绿医用 X 光胶片具有以下特点：



高分辨率、高精细度和低雾度


高处理能力（最小化的速度对比度变化）

更清晰色彩更蓝的影像

阻止密度降低

传输可靠性(抗静电性和显著的表面平滑度)

一贯的高品质

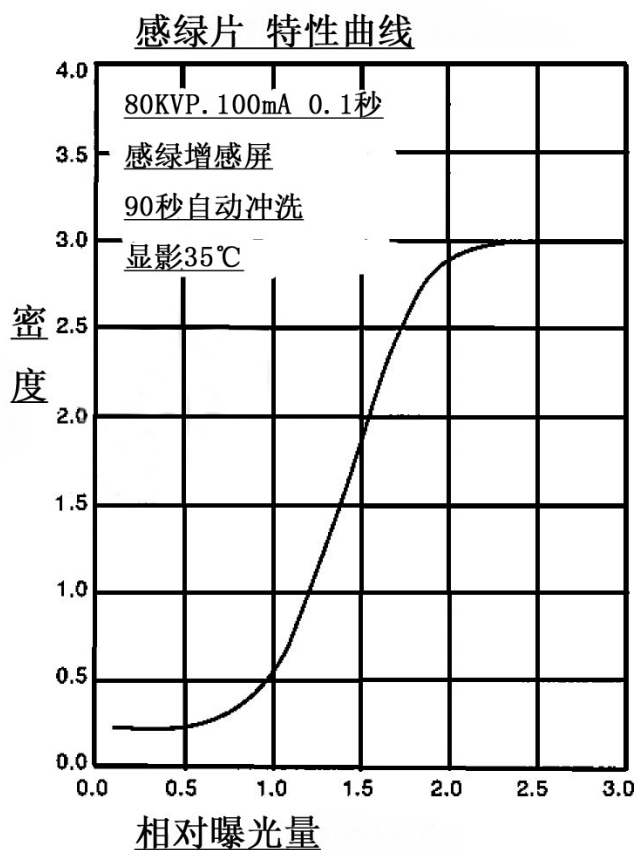

**MG-SR 医用 X 射线胶片使用上注意：**

## ● 使用

正确处理胶片，防潮、防晒、防热、防辐射及因压力对胶片造成的伤害。

## ● 储存

放在凉爽（温度 10℃~23℃），干燥（湿度 30%~60%）的地方储存。避免潮湿、高温以及一切不良气体。避免受 X 射线、伽玛射线及其他具有穿透力射线的影响。

## ● 安全灯

建议采用深红色滤色片套住 15 瓦磨砂灯泡，置于距胶片至少 1.2 米处。

## ● 自动冲洗

富明威 **MG-SR** 医用 X 射线胶片适用于各种洗片机冲洗

## ● 人工冲洗

该片可以高温机显或常温手显

**市场报价表：**

品名	规格	商标	单位	报价 (元/盒)	包装数量 (盒/箱)	备注
医用 X 光 (感绿片 MG-SR)	8×10in×100	富明威	盒	545	5	
	10×12in×100	富明威	盒	820	5	
	11×14in×100	富明威	盒	1060	5	
	12×15in×100	富明威	盒	1300	5	
	30×40in×100	富明威	盒	1300	5	
	14×14in×100	富明威	盒	1345	5	
	14×17in×100	富明威	盒	846	4	